



# מדריך להתחלה מהיר

טיפול בפולסים אלקטרומגנטיים (PEMF) בכל עת, בכל מקום

## לשימוש פעמיים ביום

בעת שימוש ב-Oska Pulse לפחות פעמיים בכל יום תזכו לתוצאות הטובות ביותר. ניתן לפצל כל טיפול לפי הצורך. לדוגמה, תיהנו מטיפול בבוקר ובערב. קחו איתכם את מכשיר ה-Oska Pulse כשאתם יוצאים לפעילויות היומיומיות שלכם.



## המפתח הוא התמדה

השתמשו ב-Oska Pulse בכל יום. ניתן לעקוב אחר ההתקדמות שלכם באמצעות מילוי טבלת המעקב בת 30 הימים המוצגת בחלק האחורי של מדריך זה.



## שתו הרבה מים

הקפידו על שתיית מים מרובה על מנת לסייע לגוף למקסם את היתרונות.



## למה אפשר לצפות

### מכשיר נייד

Oska Pulse תוכנן להיות משולבת באופן מלא באורח החיים שלכם, כדי שתוכלו להפיק ממנו תועלת בכל עת ובכל מקום.



טיפול PEMF עובד שונה עבור כל אחד ואחת. חלק מהמשתמשים חווים הקלה תוך מספר ימים, ועבור האחרים עשויים לחלוף מספר שבועות או יותר.



אלקטרודות


חום

קור/קרח

עקצוץ


עם Oska Pulse לא תרגישו חום, פעימות או עקצוצים. חלקכם עשויים להבחין בהתחממות קלה של אזור הטיפול עקב זרימת דם מוגברת.

## טעינת Oska Pulse

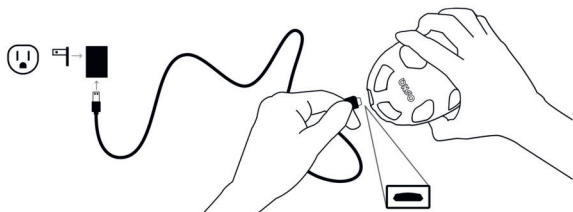

תחברו את קצה המיקרו-USB של הכבל ליציאת הטעינה הממוקמת בקצה מכשיר ה-Oska Pulse. האורות הממוקמים בקצה הנגדי ליציאת הטעינה יידלקו. כאשר האורות כבים, המכשיר טעון במלואו. הטעינה המלאה של המכשיר עשויה להימשך עד 3 שעות. הטעינה המלאה יכולה לספק לעד 20 שעות שימוש. ניתן לעיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף על טעינת Oska Pulse.

# שימוש במכשיר ה-Oska Pulse

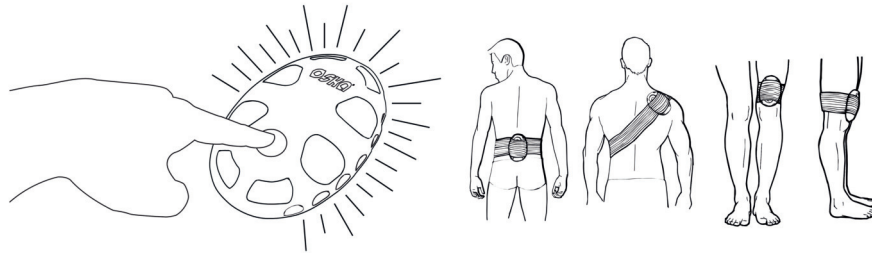

## מיקום המכשיר

יש למקם את המכשיר על האזור המטופל או על ידו.

## הפעלה

לחצו על הכפתור פעם אחת. אתם תשמעו צפצוף רך בודד ותשימו לב שאורות ה-LED מתחילים להבהב.

## כיבוי

מכשיר ה-Oska Pulse מתוכנן לפעולה רציפה של 3 שעות. המכשיר יכבה באופן אוטומטי בתום ההפעלה. כדי לכבות אותו לפני כן, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה 3 פעמים. המכשיר יצפצף מספר פעמים ואורות ה-LED יפסיקו להבהב אחרי הכיבוי. ניתן לעיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Oska Pulse.

## טבלת מעקב בת 30 הימים

מלאו טבלה זו מדי יום כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלכם

יום 1	יום 7	יום 13	יום 19	יום 25
יום 2	יום 8	יום 14	יום 20	יום 26
יום 3	יום 9	יום 15	יום 21	יום 27
יום 4	יום 10	יום 16	יום 22	יום 28
יום 5	יום 11	יום 17	יום 23	יום 29
יום 6	יום 12	יום 18	יום 24	יום 30

## התווית נגד השימוש

- אכלוסיית המטופלים במכשיר Oska Pulse כוללת גברים ונשים בוגרים נטולי אף אחת מההתוויות הנגד הבאות:
- אין להשתמש במכשיר אם יש לך קוצב לב, דפיברילטור או מכשיר רפואי מושתל אחר, אלא אם הרופא שלך אישר זאת מראש.
- אין להשתמש אם יש לך שתל העשוי מחומרים מגנטיים או מתכתיים. יש להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש.
- אין להשתמש אם קיבלת זריקת קורטיקוסטרואיד. יש להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש.
- אין להשתמש אם את בהריון או אם את מניקה.
- אין להשתמש אם היה לך סרטן או בעת קבלת טיפול מסרטן אלא אם התייעצת עם הרופא שלך והשימוש מאושר.
- אין להשתמש אם מופיעה תחושת כאב, אך לא ידוע מה מקור הכאב. יש להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש.
- אין להשתמש אם יש לך נטייה לדימום בעקבות פציעה אקוטית או שברים בעצמות.
- אין להשתמש לך או לכל אדם אחר, לרבות ילדים, אם יש יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה לך הדרכה ופיקוח נאותים.



ניתן לצפות בגרסה המלאה של המדריך ובסרטון ההדרכה דרך הקישור: [www.alphamed.co.il/guides](http://www.alphamed.co.il/guides) או על ידי סריקת הקוד: