

OSKA® | PULSE

From Your Doctor



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

www.alphamed.co.il

Tel: 1-700-70-00-70

РЕМФ ТЕРАПИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ



ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2 РАЗА В ДЕНЬ И БОЛЕЕ

Использование устройства Oska Pulse **по крайней мере** 2 раза в день принесёт вам наибольшую пользу.

Вы можете планировать сеансы по вашему желанию. Например, устройте терапевтический сеанс утром и вечером. Возьмите с собой устройство Oska Pulse, когда будете заниматься повседневной деятельностью.



ПОСТОЯНСТВО — ВОТ КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

Используйте устройство Oska Pulse ежедневно. Вы можете отслеживать свой прогресс с помощью 30-дневного дневника наблюдений, расположенного на обратной стороне этого руководства.



ПЕЙТЕ МНОГО ВОДЫ

Обязательно пейте много воды, чтобы помочь своему организму получить максимальную пользу.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ



ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

Oska Pulse полностью интегрируется в ваш образ жизни, поэтому вы можете воспользоваться им в любое время, где бы вы ни находились.

PEMF терапия работает по-разному для каждого. Некоторые пользователи испытывают облегчение в течение нескольких дней, а для других это может занять несколько недель или больше.



ЭЛЕКТРОДЫ



НАГРЕВ




ХОЛОД/ЛЁД



ПОКАЛЫВАНИЕ

При использовании устройства Oska Pulse вы не почувствуете никакого нагрева, пульсации или покалывания. Некоторые могут заметить небольшое потепление в области обработки из-за увеличения кровотока.

ЗАРЯДКА OSKA PULSE

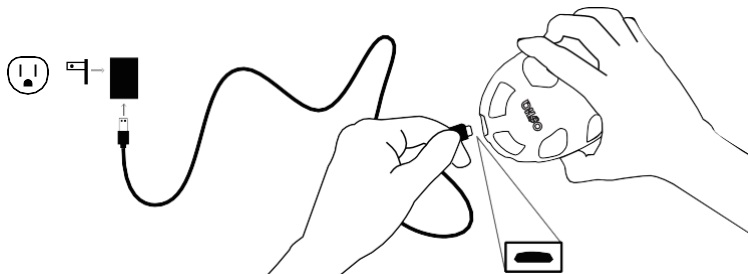

Подключите конец кабеля микро-USB к зарядному порту, расположенному на конце Oska Pulse.


Загорятся световые индикаторы, расположенные на противоположном конце устройства от зарядного порта.

После завершения зарядки индикаторы выключаются.

Полная зарядка устройства может занять до 3 часов. Полная зарядка может обеспечить до 20 часов использования.

См. Руководство пользователя для получения дополнительной информации о зарядке Oska Pulse.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OSKA PULSE

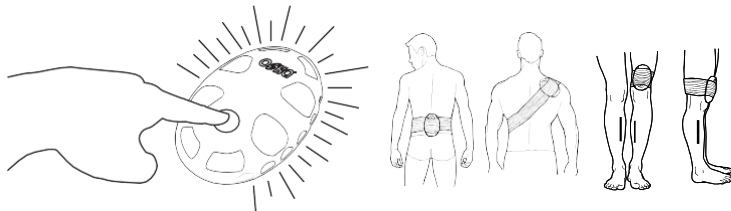

РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Поместите устройство на целевую область или рядом с ней.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку один раз. Вы услышите 1 мягкий звуковой сигнал и заметите, что индикаторы начинают мигать.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА |

Oska Pulse настроен на работу в течение 3 часов. Устройство автоматически выключится в конце сеанса. Для преждевременного выключения нажмите кнопку питания 3 раза. Устройство подаст звуковой сигнал несколько раз, а светодиодные индикаторы перестанут мигать при выключении питания.

См. Руководство пользователя для получения дополнительной информации об использовании Oska Pulse.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В группу пациентов Oska Pulse входят взрослые мужчины и женщины, у которых нет каких-либо из следующих противопоказаний:

- Не используйте устройство, если у вас установлен кардиостимулятор, дефибриллятор или другое имплантированное медицинское устройство, если только ваш врач не дал предварительного разрешения.
- Не используйте устройство, если у вас установлен имплантат, изготовленный из магнитных или металлических материалов. Если вы не уверены, перед использованием обратитесь к врачу.
- Не используйте устройство, если вы получали инъекцию кортикостероидов. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте устройство, если вы беременны или кормите грудью.
- Не используйте устройство, если у вас был рак или вы лечитесь от рака, пока вы не проконсультировались с врачом и не получили одобрение на использование.
- Не используйте устройство, если вы чувствуете боль, но не знаете её причину или происхождение. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте устройство, если у вас есть склонность к кровотечению после острой травмы или переломов костей.
- Не используйте устройство, если у вас или любого другого человека, включая детей, ограничены физические, сенсорные или умственные способности или отсутствует опыт и знания, , за исключением, если было проведено надлежащее обучение и нахождение под наблюдением.

30-ДНЕВНЫЙ ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ

Используйте ежедневно, чтобы отслеживать свой прогресс

День 1 _____

День 2 _____

День 3 _____

День 4 _____

День 5 _____

День 6 _____

День 7 _____

День 8 _____

День 9 _____

День 10 _____

День 11 _____

День 12 _____

День 13 _____

День 14 _____

День 15 _____

7

День 16 _____

День 17 _____

День 18 _____

День 19 _____

День 20 _____

День 21 _____

День 22 _____

День 23 _____

День 24 _____

День 25 _____

День 26 _____

День 27 _____

День 28 _____

День 29 _____

День 30 _____